

mikrozid® AF liquid



Tipul preparatului

Soluție fără aldehide, pe bază de alcool, pentru dezinfecția rapidă

- soluție gata preparată
- spectru larg de acțiune în cel mai scurt timp posibil
- bună capacitate de acoperire
- uscare rapidă fără a lăsa urme

Acțiune microbiologică

mikrozid® AF liquid este eficace împotriva: ■ bacteriilor (incl Tb) ■ fungilor ■ virusului hepatitei B ■ HIV ■ HCV ■ adeno virusuri ■ rota virusuri ■ papova virusuri ■ polio virusuri

Domeniul de utilizare

Dezinfecția rapidă pe bază de alcool a dispozitivelor medicale [CE₀₂₉₇] în toate domeniile cu un risc ridicat de infecție și unde se cere un timp de contact scurt, de ex.:

- Unități de tratament
- Mese de examinare
- Mese de operație și suprafețe de lucru din apropierea acestora
- Suprafețele dispozitivelor medicale

Date tehnice

■ Compoziție:

100 g soluție conțin: 25 g etanol (94%), 35 g 1-Propanol

■ Date fizico-chimice:

Aspect: lichid clar incolor
Densitate (20°C): aprox. 0,895
Vâscozitatea: < 15 sec. (conf. DIN 53211)
Stabilitatea la temp.: -5°C până la + 40°C
pH: aprox. 6,0
Punct de inflamabilitate: 27°C (DIN 51755)

Mod de livrare

Ambalaj individual	Ambalaj colectiv
Flacon de 250 ml	10 x 250 ml
Flacon de 1 litru	10 x 1 litru
Canistră 10 litri	1 x 10 litri

Accesorii pentru dozare

- Pulverizator pentru flacon de 1 litru

Timpi de contact

Acțiune microbiologică	Timpi de contact
Bacterii, fungi (în conf. cu ghidul DGHM cu timp de contact scurt)	1 min.
MRSA (Stafilococ auriu multirezistent)	1 min.
Tb	1 min.
Adeno virusuri	2 min.
HBV (HBsAg-test) ¹⁾ , HIV	1 min.
HCV ²⁾	30 sec.
BVDV	30 sec.
Vaccinia	30 sec.
Rota virusuri	30 sec.
Polio virusuri ³⁾	30 min.
Papova SV 40	15 min.
Lista DGHM / Certificat Dezinfecția suprafețelor în spitale și cabinete medicale	5 min.
OGHMP Expertiza nr. 95/8	1 min.

¹⁾ Dr. Steinann, Bremen, 22.03.95

²⁾ Virus surogat BVDV

³⁾ AFNOR NFT 72-180

Etichetarea în conformitate cu normele CE

Xi: Irritant
R 10: Inflamabil
R 41: Risc de leziuni serioase la ochi
R 67: Vaporii pot cauza amețeală și somnolență
S 23: A nu se inhala aerosolii
S 26: În caz de contact cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență și se cere sfatul medicului
S 39: A se utiliza protecție pentru ochi/față
S 51: A se utiliza doar în spații care se pot aerisi bine

Note speciale:

A nu se inhala. Se recomandă utilizarea mănușilor la manipularea soluției. Nu aduceți în contact cu ochii. Nu utilizați produsul pentru suprafețe sensibile la alcool (de ex. sticlă acrilică).



Informații de mediu

Producătorul Schulke utilizează procese tehnologice avansate și adecvate pentru protecția mediului fără a afecta standardele înalte de calitate ale produselor.

Instrucțiuni pentru utilizare

mikrozid® AF liquid este o soluție gata preparată. Se aplică nediluată pe obiecte și suprafețe și se lasă să acționeze. Asigurați acoperirea în întregime a suprafețelor. Îndepărtați surplusul de produs cu un șervețel de unică folosință.

Produs avizat de Ministerul Sănătății
Produsul corespunde cerințelor directivei Europene 93/42/EEC cu privire la dispozitivele medicale.



Firma Schulke & Mayr deține certificate DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 și DIN EN ISO 13485 (Nr. înreg. 004567-MP23) și are implementat un sistem de management al mediului validat în conformitate cu Reglementările Eco Audit (Nr. înreg. D-150-00003).

Producător:
Schulke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germania
Tel.: +494052100-0
Telfax: +494052100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

